

## Faldalarm



Vil du vide mere?

Så kontakt os.

**TELETEKNIK**  
[www.teleteknik.dk](http://www.teleteknik.dk)  
**9714 1586**

Kan afgive signal med 4 forskellige betydninger:

- 1) Ved fald når der tiltes (hælder) over 60° i over 15 sekunder
- 2) Testsignal
- 3) Manuel alarm
- 4) Når senderen forlader personen

Tiltalarmen kan enten frakobles  
**Momentant** i 5 minutter eller  
**Vedvarende**

Alarmsenderen føres i en bæltetaske.

Vi arbejder med:  
*Sikkerhedssystemer*  
*Intern kommunikation*  
*Mikrofon, højttaler og teleslyngeanlæg*  
*Radionlæg*  
*Tidsregistrering*  
*Kalde- og personsøgeranlæg*  
*Omverdenskontrol for bevægelsehandikappede*

## Epilepsialarm EPI 2000



*og tilhørende alarmmodtager*



**RX-300**

## Dette system giver dig tryghed

Fleksibelt besked ved valg mellem lyd og vibrator  
(lydløs)  
Batterialarm

Besked kan gives på ønsket middel

Selv bestemme antal rystelser før alarm for  
tilpasning af den enkeltes anfaldsmønster og  
søvnaktivitet

Du kan selv bestemme funktionstiden  
Manuel / urstyring

Give øjeblikkelig besked om anfald

Let at bære modtageren

## Systemets gode sider

Ingen nettilslutning, men standard batterier.  
Diskret signalgivning.

Kald kan modtages enten lokalt eller videresendes  
gennem telefonnettet

Parametrene kan indstilles af brugeren

Bruger kan selv indkode funktionstiden

Ingen myndighedsregistrering af sender

Modtageren har en lille bærekliks.

## Systemets egenskaber

Alarmsenderen ophænges under sengen.  
Ved brikse benyttes en ekstern føler.  
Batteridrevet fra standard batterier

Parametre indstilles fra 1-9 og 10-90 rystelser inden  
kald

Internt ur

Inderholder lille radiosender, der ikke skal anmeldes  
til telestyrelsen.  
Rækkevidde: inden for boligen  
Mål for alarmsender 128 x 65 x 23 mm  
Vægt 137 g

Modtageren har omskifter for tænd/sluk, lyd eller  
vibrator. Et display lyser op, når der kaldes.

Mål for modtager 85 x 46 x 16 mm  
(med klips 20mm)  
Vægt 62 g