

# Lydaktiveret Kald



Vi har mulighed for at lave et kald til en hjælper ved hjælp af et lydaktiveret kald. Denne enhed, der spændingsforsynes fra en stikkontakt via en omformer, måler lydstyrken i rummet enten med den indbyggede mikrofon eller med en løs udvendig. Med indstillingen LEVEL indstilles hvor høj en lyd, der ønskes før end der aktiveres et kald medens indstillingen TIME bruges til at bestemme hvor længe lyden skal være der. Kontakten har en relæudgang og kan derfor bruges til at aktivere såvel kaldeanlæg, tryghedstelefoner og som personsøgersendere for eksempel sammen med RX-300

Vi har fået tildelt HMI nummer 31005 til dette kald.

*Vi tilpasser teknikken til mennesket*